

20.8.2019

Laskon näytteenottoputki ja viitealueet muuttuvat

Tämä tiedote koskee NordLab Kajaanin aluelaboratorion asiakkaita.

Lasko
B –La, 2203

**Muutos tulee
voimaan** 2.9.2019

**Muutoksen
kuvaus**

NordLab Kajaanin aluelaboratoriossa laskonäytteiden analysointi siirtyy uusille automatisoiduille laitteille, samalla analysointi keskitetään koko Kainuusta keskussairaalan laboratorioon. Laitevaihdoksen yhteydessä näytteenottoputkeksi vaihtuu EDTA-putki (5/3 ml, ref 368499, keskusvaraston tilausnumero S312666). Näyte voidaan lähettää analysoitavaksi huoneenlämpöisenä, mikäli se saapuu laboratorioon 4 tunnin kuluessa näytteenotosta. Muutoin näyte lähetetään jääkaappilämpötilassa, jolloin näyte laitettava mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen kylmään. Näyte ei saa jäätä. Jääkaappilämpötilassa näyte säilyy analysointikelpoisena 36 tuntia.

Laskotutkimuksen mittaustapa säilyy entisellään ja tulostaso ei muutu. Laitevaihdoksen yhteydessä viitevälit yhtenäistetään koko Nordlabin alueella. Käyttöön tulee seuraavat viitevälit:

	Vanha viiteväli	Uusi viiteväli	Yksikkö
Lapset (alle 18 v)	<15	<15	mm/h
Naiset	alle 50v <20 yli 50v <30	18-50v <15 51-70 <20 yli 70v <35	mm/h
Miehet	alle 50v <15 yli 50v <20	18-50v <10 51-70v <13 yli 71v <30	mm/h

**Tiedusteluihin
vastaavat**

Jani Rytönen, sairaalakemisti, 044 7974 915, jani.rytkonen@nordlab.fi

Seppo Laitinen, ylikemisti, 040 8223 157, seppo.laitinen@nordlab.fi

Jani Rytönen
NordLab Kajaanin vs. aluelaboratorion johtaja

Jakelu Nordlab Kajaanin asiakkaat