

Alzheimerin taudin merkkiaineiden (Li-BAm42, Li-Tau, Li-FosTau) näyteputki ja näytteen lähetysohjeet muuttuvat 1.4.2022 alkaen

Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikön Alzheimerin taudin merkkiaineiden (Li-FosTau (4809), Li-Tau (4810), Li-BAm42 (4811)) näyteputki ja näytteen lähetysohjeet muuttuvat 1.4.2022 alkaen. Muutoksen syynä on mittausmenetelmän päivitys ja uudet preanalyytiset suositukset.

Näyteputki 1.4.2022 alkaen:

Sarstedt CSF valepohjaputki 2.5 ml (75 × 13 mm), polypropyleeni, REF 63.614.625.



Pyydämme tiputtamaan likvoria 2.5 ml suoraan putkeen merkkiviivaan saakka. Näytettä tarvitaan 1 × 2.5 ml riippumatta siitä, pyydätkö yhden merkkiaineen analyysin vai yhdistelmän.

Mikäli näyte saapuu väärässä putkessa tai jos näytettä on alle 2.0 ml, siitä mitataan vain Tau ja FosTau. Syynä tähän on putken koon ja näytetilavuuden vaikutukset BAm42-mittaustuloksiin.

Näytettä ei tarvitse sentrifugoida eikä sitä saa siirtää uuteen putkeen. Näyte säilytetään näytteenottoputkessa jääkaapissa ja lähetetään huoneenlämpöisenä vuorokauden (24 h) sisällä näytteenotosta. Vuorokautta pidempi säilytys ja lähetys +4°C (max 5 vrk) tai pakastettuna vähintään -20°C (max 6 kk).

Putken muutos ei vaikuta Li-FosTau, Li-Tau tai Li-BAm42 viitearvoihin.

Jatkossa voitte tilata näyteputkia veloituksetta osoitteesta: alzheimermarkkeri@uef.fi

Tiedusteluihin vastaa Tuija Männistö
NordLab, johtava lääkäri

Jakelu Kaikki NordLabin asiakkaat